

# Xtend® Connect Prime

## Caractéristiques techniques

Xtend Connect Prime est un adaptateur rapide breveté qui permet à l'utilisateur de démonter sa prothèse en plusieurs parties pour faciliter le changement de pied, de pantalon ou simplement pour gagner de la place, par exemple lors d'un voyage. Par ailleurs, Xtend Connect Prime fonctionne comme n'importe quel adaptateur et possède les interfaces standard communes pour s'adapter à la plupart des produits prothétiques sur le marché.

### Double verrouillage

Xtend Connect Prime est le seul produit sur le marché à disposer d'une double fonction de verrouillage de sécurité, avec à la fois un bouton de sécurité et une molette de verrouillage. Cela garantit une utilisation en toute sécurité



### Poids du patient

Le poids maximum du patient est de 150 kg. Vérifiez toujours le poids du patient. Le poids maximum ne doit pas être dépassé.



### Matériau








Le boîtier principal du Xtend Connect Prime est en acier inoxydable et le mécanisme de verrouillage est en bronze d'aluminium. Les vis sont en titane et la roue de verrouillage est en polyamide.

### Aqua Compatible

Toutes les pièces du Xtend Connect Prime sont garanties pour une utilisation dans l'eau salée, l'eau de piscine et l'eau douce



### Unités d'ajustement rapide et Unités de base

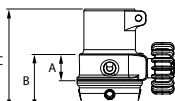
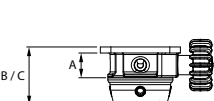
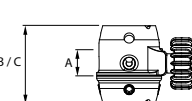
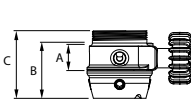
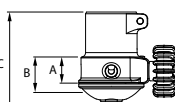
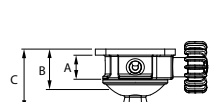
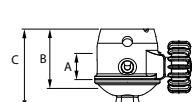
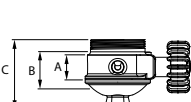
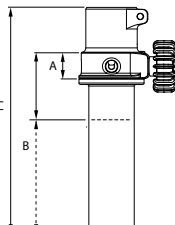
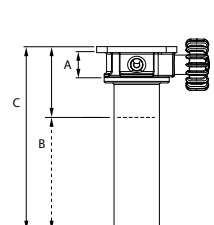
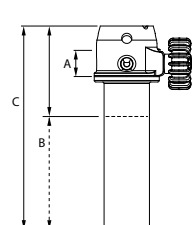
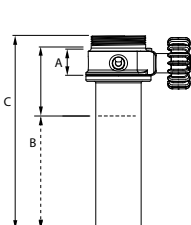
Référence	Descriptio
 A100-Q30-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec fixation pour tube de 30 mm.
 A100-Q4-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec adaptateur 4 trous.
 A100-QF-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec adaptateur pyramide femelle.
 A100-QP-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec adaptateur de broche M36.
 A100-BF-150	Unité de base Xtend Connect avec adaptateur pyramide femelle.
 A100-BM-150	Unité de base Xtend Connect avec adaptateur pyramide mâle
 A100-B30-150	Unité de base Xtend Connect avec tube de 30 mm

### Xtend Connect Prime Configurateur



Vous n'êtes pas sûr des composants nécessaires pour une configuration spécifique? Scannez le code QR et utilisez notre configurateur en ligne.

# Caractéristiques techniques – combinaisons

	<b>Q30</b> Unité d'ajustement rapide pour tube de 30 mm	<b>Q4</b> Unité d'ajustement rapide adaptateur 4 trous	<b>QF</b> Unité d'ajustement rapide adaptateur pyramide femelle	<b>QP</b> Unité d'ajustement rapide adaptateur de broche M36
<b>BF</b> Unité de base adaptateur pyramidal femelle	 A:19 D:208 B:36 E:332 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:346 C:39	 A:19 D:222 B:52 E:346 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:309 C:45
<b>BM</b> Unité de base adaptateur pyramidal mâle	 A:19 D:208 B:24 E:329 C:67	 A:19 D:208 B:27 E:344 C:40	 A:19 D:239 B:40 E:345 C:53	 A:19 D:208 B:25 E:306 C:46
<b>B30</b> Unité de base tube de 30 mm	 A:19 D:208 B:51-151* E:493* C:181	 A:19 D:208 B:54-154* E:507* C:154	 A:19 D:218 B:67-167* E:508* C:167	 A:19 D:208 B:60-160* E:471* C:160

**A** Hauteur fonctionnelle en mm **B** Hauteur effective en mm **C** Hauteur totale en mm **D** Poids effectif en g **E** Poids total en g  
\*B30 : Hauteur effective et poids adaptables car le tube peut être coupé jusqu'à 100 mm.

## Comment commander

Le Xtend Connect Prime est livré par défaut avec une molette de verrouillage noire.  
Pour une molette de verrouillage orange, supprimer le suffixe -NOIR au numéro d'article.  
Poids maximum 150 kg. Vérifiez toujours que le poids du patient est correct. Le poids maximum ne doit jamais être dépassé. Pour les sportifs intensifs, le poids maximum est de 100 kg.