

Xtend® Connect Shape

# Unsichtbar Quick Connect/Disconnect



**Material**

Hergestellt aus leichtem Aluminium.



**Doppelte Sicherheit**

Doppelte Sicherheitsverriegelung Funktion mit zwei Tasten.



**Patientengewicht**

Maximales Patientengewicht ist 100 kg.

# Erleichterung des alltäglichen Lebens

Der patentierte Xtend Connect Shape ist ein Prothesenadapter entwickelt, ihn im inneren einer Prothesenkosmetik zu verwenden, obwohl er ohne Kosmetik ebenfalls verwendbar ist. Er ist ein wertvolles Hilfsmittel, unabhängig davon ob er vom Anwender oder einer anderen Person bedient wird.



## Anziehen

Das Anziehen von Hosen über einen starren Prothesenfuß kann eine ziemliche Herausforderung sein, insbesondere bei engeren Hosen. Mit dem Xtend Connect Shape können Sie den Fuß jedoch einfach abnehmen, die Hose anziehen und den Fuß dann mühelos wieder befestigen. Voilà!



## Schuhe wechseln

Der Wechsel von einem Schuh zum anderen oder das bequeme Binden von Schnürsenkeln kann durch einen einfachen Handgriff erleichtert werden. Ziehen Sie einfach den Fuß aus und legen Sie ihn auf Ihren Schoß, während Sie die Arbeit erledigen. Diese Methode eignet sich gut für Menschen, die sich gerne hinsetzen, während sie die Schuhe wechseln oder die Schnürsenkel binden, da sie bequemer, sicherer und praktischer ist.



## Entspannen mit Komfort und Stil

Manchmal ist es mit starren und schweren Prothesenfüßen oder -beinen schwierig, eine bequeme und entspannende Position zu finden. Wo auch immer Sie den Adapter anbringen, es ist praktisch, wenn Sie die Teile bei Bedarf abnehmen können. Wenn Xtend Connect Shape oberhalb des Knies platziert wird, kann der Benutzer bei Bedarf das gesamte Gewicht des Beins einfach abnehmen.

# Es ist so toll, dass man es nicht einmal sehen kann!




Ein voll funktionsfähiger Adapter in einem Bein mit einer Kosmetik, ohne sichtbar zu sein. Sowohl stilvoll als auch funktionell.



## Erfordert minimale Stärke

Die Konstruktion von Xtend Connect Shape macht die Handhabung einfach. Er lässt sich mühelos mit einer Hand bedienen, aber wenn das nicht möglich ist, funktioniert auch ein beidhändiges Schieben gut.

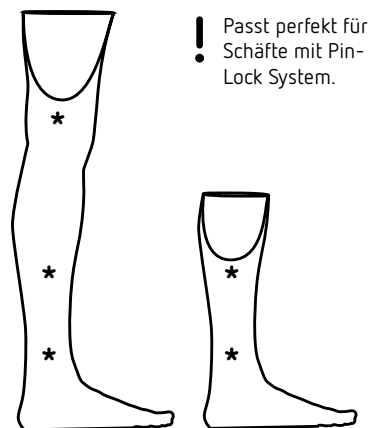

! Passt perfekt für Schäfte mit Pin-Lock System.

\* Mögliche Installationspunkte von Xtend Connect Shape.

# Zur technischen Seite

Der Xtend Connect Shape besteht aus zwei Hauptkomponenten - einer Schnellverschluss-einheit und einer Basiseinheit - sowie aus Knöpfen für den Verschlussmechanismus. Die Knöpfe bestehen aus recycelbarem Kunststoff und können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, um sie an die Dicke des Beins und an die Kosmetik anzupassen.



**Doppelte Verriegelung**  
Um das Gerät zu entsperren, müssen beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Diese garantiert eine sichere Benutzung.

**Gewicht des Patienten**  
Das maximale Gewicht des Patienten beträgt 100 kg. Überprüfen Sie immer das Gewicht des Patienten. Das Maximalgewicht darf nicht überschritten werden.




**Knöpfe**  
Im Lieferumfang enthalten sind zwei Sätze Knöpfe: zwei für die Kontrollprothese und zwei für die endgültige Version.

**Material**  
Die Form ist aus leichtem Aluminium gefertigt, mit einer speziellen Beschichtung, die eine einfache Verbindung in einer glatten Weise bietet. Die Farbe des Produkts kann variieren.


**Umdrehbar**  
Schnellverschluss-einheit und Basiseinheit funktionieren in jede Richtung.

**Gewicht**  
Gesamtgewicht 320 g.

## Die verschiedenen Komponenten von Xtend® Connect Shape

Artikelnummer	Beschreibung
 A200-SK	<b>Kompletter Bausatz:</b> Verschlusseinheit und Basiseinheit, beide mit Pyramidenaufnahme
 A200-SQF	<b>A la carte – Empfohlen wenn Sie mehrere Einheiten benötigen</b> Verschlusseinheit mit Pyramidenaufnahme
 A200-SBF	Basiseinheit mit Pyramidenaufnahme

Die Garanzzeit beträgt 1 Jahr.

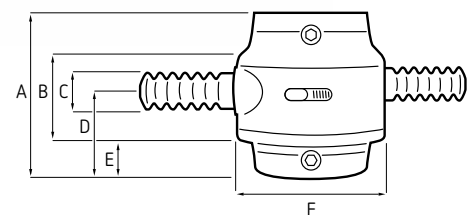

A Gesamthöhe	60 mm
B Funktionshöhe	27 mm
C Durchmesser des Knopfes	13,5 mm
D Höhe bis Mitte Knopf	31,6 mm
E Höhe bis Trennung	17,5 mm
F Durchmesser	60 mm